

EMPFEHLUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH



1. HÄNDE WASCHEN

Bevor Sie die Mund-Nasen-Maske aufsetzen: Bitte die Hände gründlich mit Seife waschen.



2. NICHT BERÜHREN

Achten Sie beim Tragen darauf, dass Sie die Maske nicht anfassen.



3. BEI FEUCHTE WECHSELN

Wird die Mund-Nasen-Maske beim Tragen feucht, wechseln Sie sie bitte umgehend aus.



4. HÄNDE WASCHEN

Bevor Sie die Maske abnehmen: Bitte die Hände wieder sorgfältig mit Seife waschen.




5. NUR SCHLAUFEN ANFASSEN

Wenn Sie die Mund-Nasen-Maske abnehmen, nutzen Sie am besten die Seitenbänder – nicht die Außenseite.



6. HÄNDE WASCHEN

Waschen Sie Ihre Hände nach dem Abnehmen erneut gründlich mit Seife.

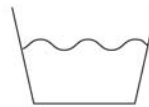

7. MASKE WASCHEN

Waschen Sie die Maske bei mindestens 60°C – ob zuhause oder in der Industrewäsche.